

## INSTRUCCIONES DE USO

ESTE FOLLETO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL USO DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. POR FAVOR LÉALO CUIDADOSAMENTE Y GUÁRDALO PARA FUTURAS REFERENCIAS. LOS LENTES DE CONTACTO SIEMPRE DEBEN SER ADAPTADOS POR UN PROFESIONAL DEL CUIDADO DE LAS VISIONES. ES ESENCIAL QUE USTED SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LAS ETIQUETAS PARA PODER USAR APROPIADAMENTE SUS LENTES DE CONTACTO.

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (Nombre)

Lentes de Contacto Esféricos:

- Lentes de Contacto Blandos AIR OPTIX<sup>®</sup> NIGHT & DAY<sup>®</sup> AQUA (Iotraficon A)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El material del lente consiste aproximadamente de 24% de agua y 76% de Iotraficon A, una fluoro-silicona que contiene hidrógeno, la cual es tratada en superficie. El aditivo de color floricianina de cobre se agrega al material de la lente para crear un color azul claro de borde a borde (tinte de manejo) para que los lentes sean más fáciles de ver cuando se están manipulando.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DESEMPEÑO

#### Propiedades de los Lentes:

- Índice Refractivo (hidratado): 1.43
- Transmitancia de Luz: > 96% (varía con el poder)
- Permeabilidad de Oxígeno (Dk):  $140 \times 10^{-11}$  (cm<sup>2</sup>/seg) (ml O<sub>2</sub>/ml x mm Hg), medida a 35°C (método DK intrínseco-Coulométrico)
- Contenido de Agua: 24% por peso en salina normal

#### Parámetros Disponibles de los Lentes

- Diámetro: 13.8mm
- Curva Base: 8.4 mm; 8.6 mm
- Plano: Poderes Negativo: -0.25 D a -8.00 D (en pasos de 0.25 D)  
-8.50 D a -10.00 D (en pasos de 0.50 D)  
Poderes Positivos: +0.25 D a +6.00 D (en pasos de 0.25 D)

### ACCIONES (Modo de acción)

Cuando están hidratados y ubicados sobre la córnea, los lentes de contacto Iotraficon A con tinte de manejo actúa como un medio de refracción para enfocar los rayos de luz sobre la retina

Cuando están hidratados y colocados sobre la córnea para uso terapéutico, los lentes de contacto Iotraficon A actúan como un vendaje para proteger la córnea.

### USO PREVISTO/USO

Los Lentes de contacto blandos Iotraficon A están indicados para uso sobre el ojo en personas con ojos sanos que necesiten corrección en la visión, según lo determinado y adaptado por un profesional del cuidado de la visión.

Bajo la supervisión de un profesional del cuidado de la visión, los lentes de contacto blandos Iotraficon A también están destinados al uso terapéutico como una venda para proteger la córnea, aliviar el dolor corneal y ayudar a la curación corneal.

Cuando se usa para uso terapéutico, se requiere una estrecha supervisión por parte de un profesional del cuidado de la visión.

#### Uso Previsto Específico para el Diseño del Lente (Modelo)

Diseño del lente (Modelo)	Uso previsto (Sobre el ojo)
Lente esférico – con poder correctivo	Corrección óptica de la ametropía refractiva (miopía e hipermetropía) y/o Uso terapéutico como vendaje
Lente esférico – sin poder correctivo	Uso terapéutico como vendaje

### GRUPO DE PACIENTES OBJETIVO

La población de pacientes prevista para el uso de Lentes de Contacto Blandos esféricos Iotraficon A con tinte de manejo incluye aquellas personas sin patologías oculares que requieren corrección de la visión (miopía y/o hipermetropía), que pueden ser apropiadamente adaptados con el dispositivo y que son capaces de entender y seguir las instrucciones de uso, cuidado y seguridad (o tener un cuidador que pueda actuar en su nombre). Los lentes de contacto son comúnmente usados por adultos y adolescentes. Los niños han usado lentes de contacto bajo la supervisión de un profesional del cuidado de la visión y con la supervisión de sus padres.

Para uso terapéutico, a discreción del profesional del cuidado de la visión, la población de pacientes puede incluir personas con ciertas afecciones oculares comprometidas (vea las **INDICACIONES** a continuación) y que pueden o no necesitar corrección de la visión durante la curación.

### BENEFICIOS CLÍNICOS

Los Lentes de Contacto Iotraficon A con poder refractivo proveen corrección óptica sobre el ojo para miopía y/o hipermetropía según lo determinado y adaptado por un profesional del cuidado de la visión.

Los lentes de contacto con poder correctivo proveen ventajas funcionales sobre las gafas mejorando la visión periférica (lateral) y minimizando las diferencias en el tamaño de las imágenes que resultan cuando el poder de los lentes entre los ojos no es el mismo.

Cuando son usados con fines terapéuticos, los lentes de contacto blandos Iotraficon A con o sin poder refractivo aportan una barrera mecánica entre la córnea y los párpados para proteger las superficies corneales comprometidas, reducir el dolor/incomodidad y promover la curación corneal.

### INDICACIONES (Usos)

#### Corrección de la Visión

Los lentes de contacto blandos Iotraficon A (esféricos) están indicados para la corrección óptica de la ametropía refractiva (miopía e hipermetropía) en personas fáquicas o afáquicas con ojos sanos de hasta aproximadamente 1.50 dioptrías de astigmatismo.

Los Lentes están diseñados para ser usados diariamente (menos de 24 horas mientras esté despierto) o por períodos prolongados de hasta 30 noches de uso continuo, con remoción para su desecho, o limpieza y desinfección antes de ser reinsertados, según recomiende el profesional del cuidado de la visión. Los lentes deben ser desechados y reemplazados con un nuevo par cada mes o más seguido, si es recomendado por un profesional del cuidado de la visión.

#### Uso terapéutico

Los lentes de contacto blandos Iotraficon A también están indicados para uso terapéutico. Los lentes pueden ser usados como vendaje para proteger la córnea y aliviar el dolor corneal en el tratamiento de las patologías oculares agudas o crónicas, tales como la queratopatía bullosa, las erosiones corneales, entropión, edema corneal, y distrofias corneales, así como condiciones post-quirúrgicas que resultan de la extracción de cataratas y de la cirugía de córnea. Los lentes de contacto blandos Iotraficon A para uso terapéutico también pueden proveer una corrección óptica durante la curación cuando se requiera. La supervisión cercana de un profesional del cuidado de la visión es necesaria para el uso terapéutico de los lentes Iotraficon A.

### CONTRAINDICACIONES (Razones para No Usar)

Los lentes de contacto no deben usarse junto a ciertas condiciones de salud o ambientales. Las condiciones que pueden prevenir o interferir con el uso seguro de lentes de contacto incluyen:

- Alergia, inflamación, infección o irritación dentro o alrededor del ojo o párpados.
- Película lagrimal inadecuada (ojo seco)
- Hipoestesia corneal (sensibilidad corneal reducida)
- Uso de cualquier medicamento sistémico o tóxico que este contraindicado o que interfiera con el uso de lentes de contacto, incluyendo medicamentos oculares.
- Cualquier enfermedad sistémica que pueda ser exacerbada por, o que interfiera con un uso seguro de lentes de contacto.
- Cuando los ojos se enrojecen o se irritan.

Consulte a su profesional del cuidado de la visión específicamente con respecto a estas u otras condiciones.

### EXCEPCIÓN PARA USO TERAPÉUTICO

- Los profesionales del cuidado de la visión pueden prescribir los lentes de contacto blandos Iotraficon A para ayudar en el proceso curativo de ciertas condiciones corneales.

### ADVERTENCIAS

- Se ha demostrado que el riesgo de queratitis ulcerativa (una infección ocular grave) es mayor entre los usuarios de lentes de uso prolongado que entre los usuarios de lentes de uso diario.<sup>1</sup>
- Graves problemas oculares, incluyendo úlceras corneales (queratitis ulcerativa), pueden desarrollarse rápidamente y llevar a pérdida de visión.
- El uso de lentes de contacto aumenta el riesgo de infecciones oculares. Dormir con los lentes y/o fumar aumenta aún más el riesgo de queratitis ulcerativa en usuarios de lentes de contacto.<sup>1,2</sup>
- Si un paciente experimenta malestar ocular, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo excesivo, cambios en la visión, enrojecimiento del ojo, u otros problemas oculares, debe indicarse al paciente que remueva inmediatamente los lentes y que contacte lo más pronto posible a su profesional del cuidado de la visión.
- Problemas con los lentes de contacto y productos para cuidados de lentes de contacto pueden ocasionar lesiones graves en el ojo. Es esencial seguir las instrucciones del profesional del cuidado de la visión y todas las instrucciones del etiquetado de los lentes y los productos para cuidados de los lentes.
- No se deben usar líquidos no-estériles (ej., agua de la llave, agua destilada, solución salina hecha en casa, o saliva) como sustituto de ninguno de los componentes en el proceso de cuidado del lente. El uso de agua de la llave y de agua destilada han sido asociados con queratitis por *Acanthamoeba*, una infección corneal que es resistente al tratamiento y a la curación.

### INFORMACIÓN ADICIONAL PARA USO TERAPÉUTICO

- La supervisión profesional cercana es necesaria para el uso terapéutico de los lentes Iotraficon A.
- Los medicamentos que son necesarios para el tratamiento deben ser usados con cautela bajo supervisión cercana de un profesional del cuidado de la visión.

### PRECAUCIONES

#### Precauciones Especiales para el Profesional del Cuidado de la Visión:

- Al seleccionar un diseño de lente apropiado y parámetros, el profesional del cuidado de la visión debe tomar en consideración todas las características del lente que puedan afectar el desempeño de este y la salud ocular, incluyendo la permeabilidad de oxígeno, el espesor central y periférico y el diámetro de la zona óptica.
- Las lentes de prueba para fines de adaptación y diagnóstico deben desecharse después de un solo uso y no deben reutilizarse de paciente a paciente.
- La salud ocular del paciente y el desempeño del lente en el ojo deben ser evaluados cuidadosamente desde la entrega inicial y monitoreados en forma continua por el profesional del cuidado de la visión.
- La fluoresceína, que es una tintura amarilla, no debe usarse mientras los lentes estén en los ojos. Los lentes absorben esta tintura y se decoloran.
- Los diabéticos pueden tener sensibilidad corneal disminuida y por lo tanto pueden ser más propensos a sufrir lesiones corneales y no sanan con la misma rapidez o en forma completa como los no diabéticos.
- Los cambios visuales o los cambios en la tolerancia de los lentes pueden ocurrir durante el embarazo o durante el uso de anticonceptivos orales. Se debe advertir a los pacientes de acuerdo a esto.
- Los profesionales del cuidado de la visión deben instruir al paciente para que remueva los lentes inmediatamente si el ojo se enrojece o se irrita.
- Antes de abandonar la oficina del profesional del cuidado de la visión, los pacientes deben ser capaces de remover rápidamente sus lentes o debe haber alguien disponible que les pueda remover los lentes.
- Los exámenes oculares de rutina son necesarios para garantizar la salud continuada de los ojos del paciente. Alcon recomienda que los pacientes visiten a su profesional del cuidado de la visión por lo menos una vez al año, o con mayor frecuencia, según lo recomiende el profesional.
- Los pacientes deben ser monitoreados de cerca durante el primer mes de uso continuo, ya que este período de observación puede predecir el eventual éxito del paciente. Aquellos que tienen reacciones inflamatorias durante esta fase temprana pueden no ser candidatos aptos para el uso continuo.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL PARA USO TERAPÉUTICO

- La supervisión profesional cercana es necesaria para el uso terapéutico de los lentes Iotraficon A.
- En algunas circunstancias, solo el profesional del cuidado de la visión insertará y removerá los lentes, y si esto es así, los pacientes deben ser instruidos acerca de NO manipular los lentes por sí mismos.

#### Precauciones de Uso y Manejo de los Lentes:

- Revise sus ojos a diario para asegurarse de que se ven bien, se sienten cómodos y que su visión sea clara.
- No lo use si el empaque blíster está dañado o no está sellado totalmente. Esto puede ocasionar la contaminación del producto lo que puede llevar a una infección seria del ojo.
- Si un empaque blíster se abre involuntariamente antes de que el lente se vaya a usar, la lente se debe guardar en un estuche limpio. Los productos para el cuidado de lentes no son todos iguales, así que siga las instrucciones de uso del fabricante para almacenar, limpiar y desinfectar el lente antes de usarlo.
- En aras de mantener la salud y la seguridad de sus ojos, un profesional del cuidado de la visión debe determinar el horario de uso de los lentes. A menos que un profesional del cuidado de la visión haya prescrito un horario de uso prolongado, no use lentes de contacto (Iotraficon A) mientras duerme. Nunca se exceda en el horario de uso prescrito, no importa lo cómodos que los lentes se sientan. Hacerlo puede aumentar el riesgo de efectos adversos.
- No comparta los lentes con nadie ya que esto puede diseminar microorganismos lo que puede ocasionar graves problemas de salud ocular.
- Nunca permita que los lentes de contacto entren en contacto con líquidos no-estériles (incluyendo agua de la llave y saliva) ya que puede ocurrir contaminación microbiana que puede conllevar a daño ocular permanente.
- Nunca use agua, solución salina, o gotas lubricantes para desinfectar sus lentes. Estas soluciones no desinfectarán sus lentes. El no usar la solución desinfectante recomendada puede llevar a una infección severa, pérdida de visión o ceguera.
- Consulte a su profesional del cuidado de la visión antes de usar lentes de contacto durante actividades deportivas incluyendo natación y actividades relacionadas con el agua. La exposición al agua (u otros líquidos no-estériles) mientras se usan lentes de contacto en actividades como natación, esquí acuático y los jacuzzis puede aumentar el riesgo de infección ocular, incluyendo, pero no limitándose a queratitis por *Acanthamoeba*.
- Remueva y deseché los lentes cuando estos hayan estado expuestos a vapores nocivos o irritantes.
- Deséchelos los lentes de contacto que se hayan deshidratado o dañado. Reemplácelos con lentes nuevos.
- Se recomienda que los usuarios de lentes de contacto visiten a su profesional del cuidado de la visión al menos una vez al año según sean instruidos.
- Informe a su empleador que usted usa lentes de contacto, especialmente si su trabajo involucra el uso de equipo de protección ocular.
- Esté atento acerca del poder correcto del lente para cada ojo. Antes de la inserción del lente, asegúrese de que el poder del lente en cada empaque sea el correcto para ese ojo.
- No cambie el tipo de lentes o parámetros sin consultar primero a su profesional del cuidado de la visión.
- Si deja de usar los lentes por un largo tiempo, consulte su profesional del cuidado de la visión antes de retomar el uso.
- Tenga cuidado cuando use jabones, lociones, cremas, cosméticos o desodorantes ya que pueden causar irritación si entran en contacto con sus lentes.
- Inserte los lentes antes de colocarse maquillaje, y remuévalos antes de quitarse el maquillaje.
- Lleve siempre lentes de repuesto con usted o disponga de gafas de reemplazo.
- No utilice los lentes después de la fecha de expiración.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL PARA USO TERAPÉUTICO

- El profesional del cuidado de la visión puede indicarle NO insertar o remover sus lentes por sí mismo. Bajo estas circunstancias, el profesional insertará y removerá los lentes.

### EFFECTOS ADVERSOS (Posibles Problemas y Qué se Debe Hacer)

Pueden ocurrir problemas con el uso de lentes de contacto los cuales pueden inicialmente presentarse como uno más de los siguientes signos y síntomas:

- Sensación de tener algo en el ojo (sensación de cuerpo extraño)
- Incomodidad con los lentes
- Enrojecimiento ocular
- Sensibilidad a la luz (fotofobia)
- Ardor, picazón, escozor u ojos llorosos
- Reducción de la agudeza visual
- Arco iris o halos alrededor de las luces
- Secreciones incrementadas en el ojo
- Malestar o dolor
- Ojos severamente o persistentemente secos.

Si estos síntomas son ignorados, pueden ocasionar complicaciones más serias.

### QUE HACER SI OCURRE UN PROBLEMA

Si ocurre alguno de los signos o síntomas arriba mencionados, remueva el(l) lente(s) inmediatamente

- Si el malestar o problema desaparece, observe de cerca el(l) lente(s):
    - Si un lente tiene cualquier tipo de daño, no lo coloque de vuelta en el ojo. Reemplácelo con un nuevo lente o consulte con su profesional del cuidado de la visión.
    - Si un lente está sucio, tiene una pestaña, o algún cuerpo extraño sobre él, o el problema desaparece y el lente no parece haberse afectado, límpielo completamente, enjuáguelo y desinfecte el lente antes de reinsertarlo.
  - Si los síntomas arriba mencionados continúan después de la remoción o en el momento de la reinsertación del lente, remueva el lente inmediatamente, y contacte pronto a su profesional del cuidado de la visión.
- Puede haber ocurrido una condición seria tal como una infección, úlcera corneal (queratitis ulcerativa), o iritis. Estas condiciones pueden progresar rápidamente y ocasionar una pérdida de visión permanente. Reacciones menos graves como abrasiones, manchas epiteliales, y conjuntivitis bacteriana deben manejarse y ser tratadas temprano para evitar complicaciones más serias.
- La sequedad ocasional puede ser aliviada parpadeando en forma completa varias veces o por medio del uso de gotas lubricantes que estén aprobadas para su uso con lentes de contacto blandos. Si la sequedad persiste, Consulte con su profesional del cuidado de la visión.
  - Si un lente se adhiere (deja de moverse), aplique varias gotas de solución lubricante para lentes de contacto y espere hasta que el lente empiece a moverse libremente en el ojo. Si este problema persiste, consulte con su profesional del cuidado de la visión.
  - Si un lente se desplaza del centro del ojo, puede acomodarlo de la siguiente manera:
    - Cerrando sus párpados y masajeadlo suavemente para que el lente se acomode en su sitio, o
    - Mirando en dirección del lente y parpadeando suavemente, o
    - Empujando suavemente el lente hacia la córnea con presión leve del dedo en el borde del párpado superior o inferior.
  - Si un lente se desgarran en su ojo, remueva las piezas cuidadosamente pellizcándolo como lo haría durante la remoción normal de un lente. Si las piezas del lente no se pueden remover fácilmente, no pellizque el tejido del ojo. Enjuague con solución salina estéril e intente remover las piezas de nuevo. Si esto no ayuda, contacte a su profesional del cuidado de la visión para que le asista.

### DURANTE EL USO TERAPÉUTICO

- Un efecto adverso puede deberse a la enfermedad original o a una lesión, o puede deberse a los efectos del uso de lentes de contacto. Existe la posibilidad de que la enfermedad existente o la condición puedan empeorar cuando un lente de contacto blando para uso terapéutico es utilizado para tratar un ojo previamente enfermo o que ha sufrido daños.
- Si ocurren problemas o estos empeoran, contacte inmediatamente a su profesional del cuidado de la visión y siga las instrucciones que este le provea.

### Emergencias generales:

- Cuando productos químicos de cualquier tipo salpiquen dentro de los ojos (productos del hogar, soluciones para jardinería, productos químicos de laboratorio, etc.):
  - Enjuague inmediatamente los ojos con solución salina nueva o agua de la llave.
- Remueva y deseché los lentes y contacte inmediatamente a su profesional del cuidado de la visión o acuda a emergencias hospitalarias.

SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS UTILIZADOS EN EL ETIQUETADO

SÍMBOLOS / ABREVIATURAS	DEFINICIONES
BC	Curva Base
DIA	Diámetro
PWR	Poder
D	Dioptría (poder del lente)
L	Izquierdo
R	Derecho
VP/DMAEMA	Vinilpirrolidona/Dimetilaminoetilmetacrilato
	Signo de licencia de residuos de empaque
	Código de lote
	Fecha de vencimiento
EXP	Fecha de expiración (Fecha de vencimiento)
	Sistema de barrera estéril simple
	Esterilizado a vapor
	Ejemplo de código de idioma de dos letras (Inglés)
	Precaución
	Consulte instrucciones de uso
	No utilice si el empaque blister está dañado
	Fabricante
	Fecha de manufactura
	Dispositivo Médico
	ADVERTENCIA: La Ley Federal (Estados Unidos) tiene una restricción para dispositivo que solo puede ser vendido por o bajo la orden de un profesional del cuidado de la visión licenciado.



Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

**Alcon**

Fecha de emisión: 04/2021

91024731-0421

© 2021 Alcon Inc.

Importado y distribuido en Chile por:  
Alcon Laboratorios Chile Ltda.  
Rosario Norte 615, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile

Importado y distribuido en Ecuador por:  
Alconlab Ecuador S.A.  
Quito-Ecuador  
Los lentes deben almacenarse a una temperatura no mayor a 30°C.

Importado y Distribuido en México por:  
Alcon Laboratorios, S.A. de C.V.  
Rancho San Javier S/N, Int. Lote fusión 2 y 3 interior 3B, Colonia Exhacienda San Miguel, C.P. 54715, Cuauhtitlán Izcalli, Estado de México, México.

Importado y distribuido en Uruguay por:  
Alcon Laboratorios Uruguay S.A.  
Pasaje Paseo de las Carretas 2580 / 1205-Tel: 29150915  
D.T.: Q.F. Mariano Ayende

REFERENCIAS

- Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.
- Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kanyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.

INSTRUCCIONES DE USO

USO RECOMENDADO Y PROGRAMA DE REEMPLAZO

El uso y programa de reemplazo deben ser determinados por un profesional del cuidado de la visión basándose en las necesidades individuales de cada paciente y en las condiciones fisiológicas. El profesional puede recomendar el uso diario o períodos extendidos de uso de hasta 30 noches. No todos los pacientes pueden alcanzar el tiempo de uso máximo de 30 noches continuas.

Los lentes deben ser desechados y reemplazados con un nuevo par cada mes, o aún con más frecuencia si lo recomienda el profesional del cuidado de la visión. Períodos más largos para su reemplazo no han sido estudiados y no son recomendados por Alcon.

PARA USO TERAPÉUTICO

La supervisión profesional cercana es necesaria. Los lentes de contacto lotrafilcon A pueden ser usados en una forma de uso continuo de hasta 30 noches y días o por períodos más cortos según lo considere el profesional del cuidado de la visión. Este proveerá instrucciones específicas en relación con la remoción del lente y su reinsertión.

INSTRUCCIONES DE MANEJO DE LENTES

- Siempre debe lavarse y enjuagarse totalmente las manos y secarlas completamente con una toalla limpia y libre de pelusas antes de manipular los lentes de contacto.
- Suavemente agite el empaque blister (que contenga un lente nuevo) antes de su apertura.
- Remueva el lente del empaque blister (o del estuche de almacenamiento del lente en el caso de lentes previamente usados) volcándolo suavemente sobre la palma de la mano.
- Asegúrese de que el lente se encuentre del lado correcto hacia afuera y de que tenga el lente correcto para cada ojo.
- Inspeccione los lentes antes de su inserción.
- No inserte lentes dañados o sucios.

INSTRUCCIONES DE INSERCIÓN DE LOS LENTES

- Lávese y enjuáguese las manos totalmente y séquelas completamente con una toalla limpia y libre de pelusas, antes de manipular sus lentes de contacto.
- Coloque un lente sobre la punta del dedo índice derecho o izquierdo.
- Coloque el dedo medio de la misma mano cerca de las pestañas inferiores y jale hacia abajo el párpado inferior.
- Utilice los dedos de la otra mano para levantar el párpado superior.
- Coloque los lentes directamente sobre el ojo (cornea) y suavemente ruede el dedo alejándolo del lente.
- Mire hacia abajo y lentamente suelte el párpado inferior.
- Mire hacia adelante en línea recta y lentamente suelte el párpado superior.
- Parpadee suavemente.

INSTRUCCIONES PARA REMOCIÓN DE LENTES

- Lávese y enjuáguese las manos totalmente, y séquelas completamente con una toalla limpia y libre de pelusas.
- Parpadee completamente varias veces.
- Mientras mira hacia arriba, use la punta de su dedo para deslizar el lente hacia abajo hacia la parte blanca del ojo.
- Remueva el lente pellizcando suavemente entre el dedo pulgar y el dedo índice. No pellizque el tejido del ojo.
- Si es difícil remover el lente, aplique una gota de una solución lubricante y rehumectante e intente nuevamente después de varios minutos.
- Nunca utilice pinzas, ventosas, objetos cortantes o las uñas de los dedos para remover los lentes del contenedor o de los ojos.

Si experimenta problemas con la remoción de los lentes (si los lentes se han desplazado del centro o se han dañado), lea arriba **QUE HACER SI OCURRE UN PROBLEMA**

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL CUIDADO DE LOS LENTES

Reemplazo

- o Cada vez que los lentes son removidos del ojo antes del tiempo de reemplazo programado, deben ser desechados o limpiados adecuadamente, enjuagados, y desinfectados antes de ser usados de nuevo.
- o El profesional del cuidado de la visión debe recomendar y proveer instrucciones para un sistema de cuidados del lente apropiados. No cambie el sistema de cuidado de los lentes sin consultar primero a su profesional del cuidado de la visión.
- o Los productos para el cuidado de los lentes tienen usos e instrucciones diferentes. Para evitar problemas oculares o daño de sus lentes, lea siempre y siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante para el(los) producto(s) usado(s).
- o Algunos productos para el cuidado de lentes requieren de un paso de frotar y enjuagar. Si es así, siga las instrucciones del fabricante en cuanto a la cantidad de solución a usar y en relación con el tiempo requerido para frotar y enjuagar con el fin de reducir el riesgo de infecciones oculares serias.
- Remojo y Almacenamiento de sus Lentes.
  - o Use únicamente solución nueva para el cuidado de los lentes de contacto cada vez que remoje (guarde) sus lentes.
  - o La cantidad de tiempo en que usted puede guardar los lentes antes de que sea necesario repetir los pasos de limpieza, enjuague, y desinfección, variará dependiendo del producto de cuidado para lentes que utilice. Siga las instrucciones del fabricante.
  - o No reutilice ni "complete" soluciones antiguas que queden en su estuche para lentes ya que el reúso de soluciones reduce la desinfección efectiva del lente y podría ocasionar una infección severa, pérdida de visión o ceguera. "Completar" una solución significa agregar solución nueva a la solución que ya se encuentra en su estuche.
- Después de abrir un producto para el cuidado de lentes, deseché cualquier solución restante después del período recomendado por el fabricante del producto.
- No utilice productos diseñados solo para lentes duros o rígidos permeables al gas.
- Nunca use calor con soluciones para el cuidado de los lentes o para desinfectar los lentes.
- Nunca use agua, solución salina o gotas lubricantes para desinfectar sus lentes. Estas soluciones no desinfectarán sus lentes. No usar la solución desinfectante recomendada puede provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

Uso Desechable

- No se indica ningún cuidado para lentes, ya que los lentes son desechados al ser removidos del ojo.
- Los lentes solo deben ser limpiados, enjuagados y desinfectados en caso de emergencia cuando no estén disponibles lentes de reemplazo.

SOLUCIONES DE CUIDADO DE LENTES

Siga las instrucciones del fabricante para los productos de cuidado de lentes recomendados por el profesional del cuidado de la visión. Alcon recomienda los siguientes productos, cuando estén disponibles.

- Solución de Limpieza y Desinfección AOSEPT™ PLUS con HydraGlyde™
- Solución Desinfectante Multipropósito OPTI-FREE™ PureMoist™

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL ESTUCHE DEL LENTE

Las soluciones para el cuidado de lentes de contacto y los estuches para lentes de contacto varían y tienen diferentes propósitos e instrucciones de uso. Algunos estuches son exclusivos para guardar los lentes de contacto, mientras que otros están diseñados especialmente para contener un disco neutralizante para ser usado con sistemas de limpieza y desinfección con peróxido de hidrógeno. Si no se usan diariamente, los lentes de uso reutilizable que hayan sido limpiados y desinfectados pueden ser guardados en un estuche no abierto por un período de tiempo que varía dependiendo de la solución para lentes de contacto y del estuche para lentes usado. **Siga siempre las instrucciones provistas por el fabricante para los productos usados para el cuidado de los lentes**

- El profesional del cuidado de la visión debe instruir al paciente acerca de cómo usar la(s) solución(es) para el cuidado de lentes recomendada(s) y para el estuche del lente.
- Los estuches para lentes de contacto pueden ser una fuente de crecimiento bacteriano y requieren de una limpieza, secado y reemplazo adecuados para evitar la contaminación o daño de los lentes.
  - o Limpie los estuches de los lentes de contacto con una solución para lentes de contacto apropiada y séquelos de acuerdo a las instrucciones para el estuche de los lentes. Las instrucciones de secado, tales como secado con aire o limpieza con una toalla libre de pelusas, pueden variar dependiendo del estuche para lentes usado.
  - o Reemplace los estuches para lentes de contacto por lo menos una vez cada 3 meses, o según lo recomiende el fabricante de estuches para lentes.
  - o Reemplace los estuches para lentes diseñados especialmente que contengan un disco neutralizante de acuerdo con las instrucciones del fabricante, o hágalo más pronto si los lentes que han sido limpiados y desinfectados ocasionan ardor y picazón.
  - o No guarde sus lentes ni enjuague su estuche para lentes con agua ni con ninguna solución no-estéril. Utilice únicamente solución nueva para el cuidado de lentes con el fin de evitar la contaminación de sus lentes o del estuche de los lentes. El uso de una solución no-estéril puede ocasionar una infección severa, pérdida de visión o ceguera.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Deseche los lentes de contacto y la tapa del blister en el contenedor de basura, no en el lavabo o en el inodoro. El empaque de cartón y la cubierta plástica de polipropileno (PP) del empaque del blister debe ser desechado en el contenedor de basura o reciclado de acuerdo a la guía de manejo de residuos locales.

CONTENIDO DEL ENVASE (Cómo es suministrado)

Cada lente lotrafilcon A es entregado en un empaque blister plástico de lámina sellada que contiene solución salina armoguardadora isotónica de fosfato (PBS) con 1% de Copolímero 845 (Copolímero 0.2% VP/DMAEMA), y está esterilizado al vapor.

El empaque blister está marcado con los parámetros del lente, incluyendo la curva base, diámetro, poder dióptrico, así como el número de lote de manufactura, la fecha de manufactura y fecha de expiración. El etiquetado del empaque también puede contener un código de producto: LFA140

Los lentes se suministran estériles en cajas que contienen hasta 6 lentes de contacto individualmente sellados.



91024731-0421