

INSTRUCCIONES DE USO

ESTE FOLLETO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USO Y LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO. POR FAVOR, LEER ATENTAMENTE Y GUARDAR COMO FUTURA REFERENCIA. LOS LENTES DE CONTACTO DEBEN SER ADAPTADAS POR UN PROFESIONAL DEL CUIDADO DE LA VISIÓN. ES ESENCIAL QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SU PROFESIONAL DEL CUIDADO DE LA VISIÓN Y LAS INSTRUCCIONES DEL ETIQUETADO PARA UN USO ADECUADO DE LOS LENTES DE CONTACTO.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (Nombre)
Lentes de Contacto AIR OPTIX™ COLORS (Lofrafilcon B)

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El material de los lentes consiste de aproximadamente 33% agua y 67% lófrafilcon B, una fluoro-silicona que contiene hidrógeno, la cual es tratada en superficie. En la superficie posterior del lente está incrustado un patrón de impresión cosimético que contiene una combinación de los siguientes aditivos de color: violeta de carbazol, óxidos de hierro, [ftalocianinato (2-)] cobre, ftalocianina verde y dióxido de titanio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DESEMPEÑO

Propiedades de los lentes:

- Índice de Refracción (hidratado): 1.42
- Transmitancia de luz luminosa: 95% ± 5%
- Permeabilidad de Oxígeno (DK): 110 x 10⁻¹¹ (cm²/seg) (ml O₂/ml x mm Hg), medido a 35°C (método Dk intrínseco-Coulométrico)
- Contenido de Agua: 33% del peso en solución salina normal

Parámetros disponibles de lentes

- Diámetro: 14.2 mm
- Curva Base: 8.6 mm
- Espesor Central: 0.08 mm @ -3.00 D (varía con el poder)
- Poderes: Poderes negativos: -0.25 D a -6.00 D (en pasos de 0.25 D)
-6.50 D a -8.00 D (en pasos de 0.50 D)
Poderes positivos: +0.25 D a +6.00 D (en pasos de 0.25 D)
Amethyst, Blue, Brilliant Blue, Brown, Gemstone Green, Gray, Green, Honey, Pure Hazel, Sterling Gray, True Sapphire, Turquoise
- Colores de Impresión:

ACCIONES (Modo de Acción)

Cuando están hidratados y colocados sobre la córnea, los lentes de contacto lófrafilcon B actúan como un medio de refracción para enfocar los rayos de luz en la retina.

Para los lentes de contacto lófrafilcon B con color de impresión, el patrón de impresión se mezcla con el color natural del ojo para resaltar o alterar el color aparente del ojo.

USO PREVISTO/USO

Los lentes de contacto blandos lófrafilcon B con poder correctivo y color de impresión están indicados para uso sobre el ojo en personas con ojos sanos que necesiten corrección en la visión (miopía e hipermetropía) y quieren resaltar o alterar el color aparente del ojo según lo determinado y adaptado por un profesional del cuidado de la visión.

Uso previsto específico para el diseño del lente (Modelo)

Diseño del lente (Modelo)	Uso previsto (Sobre el ojo)
Esféricos con poder correctivo y color de impresión	Corrección óptica de ametropía refractiva (miopía e hipermetropía) Realce o alteración del color aparente del ojo

GRUPOS DE PACIENTES OBJETIVO

La población de pacientes prevista para el uso de Lentes de Contacto Blandos lófrafilcon B con poder correctivo incluye aquellas personas sin patologías oculares que requieren corrección de la visión (miopía e hipermetropía), que pueden ser apropiadamente adaptados con el dispositivo y son capaces de entender y seguir las instrucciones de uso, cuidado y seguridad (o tener un cuidador que pueda actuar en su nombre). Los lentes de contacto son comúnmente usados por adultos y adolescentes. Los niños han usado lentes de contacto bajo la supervisión de un profesional del cuidado de la visión y con la supervisión de sus padres.

Los lentes de contacto AIR OPTIX™ COLORS también cuentan con un color de impresión cosimético para pacientes que quieran resaltar o alterar el color aparente del ojo.

BENEFICIOS CLÍNICOS

Los lentes de contacto blandos lófrafilcon B con poder correctivo proveen corrección óptica sobre el ojo para miopía e hipermetropía según lo determinado y adaptado por un profesional del cuidado de la visión.

Los lentes de contacto con poder correctivo proveen ventajas funcionales sobre las gafas mejorando la visión periférica (lateral) y minimizando las diferencias en el tamaño de las imágenes que resultan cuando el poder de los lentes entre los ojos no es el mismo.

INDICACIONES (Usos)

Los lentes de contacto blandos esféricos con poder refractivo AIR OPTIX™ COLORS (Lofrafilcon B) están indicados para ser usados diariamente para la corrección óptica de la ametropía refractiva (miopía e hipermetropía) en personas fáquicas o afáquicas que no tienen patologías oculares y que tienen un astigmatismo aproximado de 1.50 (D) dioptrías que no interfiera con la agudeza visual.

Los lentes de contacto blandos AIR OPTIX™ COLORS (Lofrafilcon B) actúan para resaltar o alterar el color aparente de los ojos.

Los lentes pueden ser prescritos para reemplazo frecuente/planeado con remoción diaria para limpieza y desinfección antes de la reinsertación, según sea recomendado por el profesional del cuidado de la visión. Los lentes deberían ser desechados y reemplazados con un nuevo par cada mes, o más frecuente, si es recomendado por el profesional del cuidado de la visión.

CONTRAINDICACIONES (Razones para no usar)

Los lentes de contacto no deberían ser usados en conjunto con ciertas condiciones de salud y ambientales. Las condiciones que podrían prevenir o interferir con el uso seguro de los lentes de contacto incluyen:

- Alergia, inflamación, infección o irritación dentro o alrededor del ojo o párpados.
- Película lagrimal inadecuada (ojo seco)
- Hipoestesia corneal (sensibilidad corneal reducida)
- Uso de cualquier medicamento sistémico o tóxico que esté contraindicado o que interfiera con el uso de lentes de contacto, incluyendo medicamentos oculares.
- Cualquier enfermedad sistémica que pueda ser exacerbada por, o que interfiera con un uso seguro de lentes de contacto.
- Cuando los ojos se enrojecen o se irritan.

Consulte su profesional del cuidado de la visión específicamente con respecto a estas u otras condiciones.

ADVERTENCIAS

- Los lentes de uso diario no están indicados para ser usados toda la noche. Los lentes de contacto blandos AIR OPTIX™ COLORS no deben usarse mientras se duerme.
- Los lentes de contacto, incluso si son usados por razones cosiméticas, son dispositivos médicos que deben ser usados solo bajo la dirección y supervisión de un profesional del cuidado de la visión.
- Graves problemas oculares, incluyendo úlceras corneales (queratitis ulcerativa), pueden desarrollarse rápidamente y llevar a pérdida de visión.
- El uso de lentes de contacto aumenta el riesgo de infecciones oculares. Dormir con los lentes y/o fumar aumenta aún más el riesgo de queratitis ulcerativa (una grave infección ocular) en usuarios de lentes de contacto.^{1,2}
- Si un paciente experimenta malestar ocular, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo excesivo, cambios en la visión, enrojecimiento del ojo, u otros problemas oculares, debe indicarse al paciente que remueva inmediatamente los lentes y que contacte lo más pronto posible a su profesional del cuidado de la visión.
- Problemas con los lentes de contacto y productos para cuidados de lentes de contacto pueden ocasionar lesiones graves en el ojo. Es esencial seguir las instrucciones del profesional del cuidado de la visión y todas las instrucciones del etiquetado para un uso apropiado de los lentes y los productos para cuidados de los lentes.
- No se deben usar líquidos no-estériles (ej. agua de la llave, agua destilada, solución salina hecha en casa, o saliva) como sustituto de ninguno de los componentes en el proceso de cuidado del lente. El uso de agua de la llave y de agua destilada han sido asociados con queratitis por *Acanthamoeba*, una infección corneal que es resistente al tratamiento y a la curación.

PRECAUCIONES

Precauciones Especiales para el Profesional del Cuidado de la Visión:

- Al seleccionar un diseño de lente apropiado y parámetros, el profesional del cuidado de la visión debe tomar en consideración todas las características del lente que puedan afectar el desempeño de este y la salud ocular, incluyendo la permeabilidad de oxígeno, el espesor central y periférico y el diámetro de la zona óptica.
- Los lentes de prueba con propósitos de adaptación y diagnóstico deben ser desechados después de un solo uso y no ser reusados de paciente a paciente.
- La salud ocular del paciente y el desempeño del lente en el ojo deben ser evaluados cuidadosamente desde la entrega inicial y monitoreados en forma continua por el profesional del cuidado de la visión.
- La fluoresceína, que es una tinte amarilla, no debe usarse mientras los lentes estén en los ojos. Los lentes absorben esta tinte y se decoloran.
- Los lentes de contactos impresos o tinturados cosiméticamente pueden causar reducción de la visibilidad en condiciones de poca luz.
- Los diabéticos pueden tener sensibilidad corneal disminuida y por lo tanto pueden ser más propensos a sufrir lesión corneal y no sanan con la misma rapidez o en forma completa como los no diabéticos.
- Los cambios visuales o los cambios en la tolerancia de los lentes pueden ocurrir durante el embarazo o durante el uso de anticonceptivos orales. Se debe advertir a los pacientes de acuerdo a esto.

- Los profesionales del cuidado de la visión deben instruir al paciente para que remueva los lentes inmediatamente si el ojo se enrojece o se irrita.
- Antes de abandonar la oficina del profesional del cuidado de la visión, los pacientes deben ser capaces de remover rápidamente sus lentes o debe haber alguien disponible que les pueda remover los lentes.
- Los exámenes oculares de rutina son necesarios para garantizar la salud continuada de los ojos del paciente. Alcon recomienda que los pacientes visiten a su profesional del cuidado de la visión por lo menos una vez al año, o con mayor frecuencia, según lo recomiende el profesional del cuidado de la visión.

Precauciones de Uso y Manejo de los Lentes

- Revise sus ojos a diario para asegurarse que se ven bien, se sienten cómodos y que su visión sea clara.
- No use si el empaque blíster está dañado o no está sellado completamente. Esto puede resultar en contaminación para el producto, lo que puede resultar en una infección seria ocular.
- Si el empaque del blíster es abierto involuntariamente antes de ser usado, los lentes deben ser almacenados en un estuche de lentes limpio. Los productos para el cuidado de lentes no son todos iguales, siga las instrucciones de uso del fabricante para almacenar, limpiar y desinfectar los lentes antes de usarlos.
- Con el propósito de mantener la salud y seguridad de sus ojos, el tiempo de uso de los lentes debe ser determinado por un profesional del cuidado de la visión. No use los lentes de contacto blandos AIR OPTIX™ COLORS mientras duerme.
- No comparta los lentes con nadie ya que esto puede diseminar microorganismos lo que puede ocasionar graves problemas de salud ocular.
- Nunca permita que los lentes de contacto entren en contacto con líquidos no-estériles (incluyendo agua de la llave y saliva) ya que puede ocurrir contaminación microbiana que puede conllevar a daño ocular permanente.
- Nunca use agua, solución salina, o gotas lubricantes para desinfectar sus lentes. Estas soluciones no desinfectarán sus lentes. No usar la solución desinfectante recomendada puede llevar a infección severa, pérdida de visión o ceguera.
- Consulte a su profesional del cuidado de la visión antes de usar lentes de contacto durante actividades deportivas, incluyendo natación y otras actividades acuáticas. La exposición al agua (u otros líquidos no estériles) mientras usa lentes de contacto en actividades tales como natación, esquí acuático y jacuzzi pueden incrementar el riesgo de infección ocular, incluido, pero no limitado a queratitis de *Acanthamoeba*.
- Remueva y desheche los lentes cuando estos hayan estado expuestos a vapores nocivos o irritantes.
- Desheche los lentes de contacto que se haya deshidratado o dañado. Reemplácelos con lentes nuevos frescos.
- Se recomienda que los usuarios de lentes de contacto visiten a su profesional del cuidado de la visión al menos una vez al año o según sea indicado.
- Informe a su empleador que usted usa lentes de contacto, especialmente si su trabajo involucra el uso de equipo de protección ocular.
- Esté atento acerca del poder correcto del lente para cada ojo. Antes de la inserción del lente, asegúrese de que el poder del lente en cada empaque sea el correcto para ese ojo.
- No cambie el tipo de lentes o parámetros sin consultar primero a su profesional del cuidado de la visión.
- Si deja de usar los lentes por un largo tiempo, consulte su profesional del cuidado de la visión antes de retomar el uso.
- Tenga cuidado cuando use jabones, lociones, cremas, cosméticos o desodorantes ya que pueden causar irritación si entran en contacto con sus lentes.
- Insérte los lentes antes de colocarse maquillaje, y remuévalos antes de quitarse el maquillaje.
- Lleve siempre lentes de repuesto con usted o disponga de gafas de reemplazo.
- No utilice los lentes después de la fecha de expiración.
- Los lentes tinturados o impresos cosiméticamente pueden causar reducción de la visibilidad en condiciones de baja luz.
- Los lentes de contacto AIR OPTIX™ COLORS contienen óxido de hierro el cual es un colorante de base metálica. Remueva los lentes antes de someterse a una Imagen de Resonancia Magnética (también llamado IMR o Resonancia Magnética)

EFFECTOS ADVERSOS (Posibles Problemas y Qué se Debe Hacer)

Pueden ocurrir problemas con el uso de lentes de contacto los cuales pueden inicialmente presentarse como uno o más de los siguientes signos y síntomas:

- Sensación de tener algo en el ojo (sensación de cuerpo extraño)
- Incomodidad con los lentes
- Enrojecimiento ocular
- Sensibilidad a la luz (fotofobia)
- Ardor, picazón, escozor u ojos llorosos
- Reducción de la agudeza visual
- Arco iris o halos alrededor de las luces
- Secreciones incrementadas en el ojo
- Malestar o dolor
- Ojos severamente o persistentemente secos.

Si estos síntomas son ignorados, pueden ocasionar complicaciones más serias.

QUÉ HACER SI OCURRE UN PROBLEMA

Si ocurre alguno de los signos o síntomas arriba mencionados, remueva el(los) lente(s) inmediatamente

- Si la molestia o problema desaparece, observe de cerca el(los) lente(s):
 - Si el lente tiene cualquier tipo de daño, no lo coloque de vuelta en el ojo. Reemplácelo con un nuevo lente consulte con su profesional del cuidado de la visión.
 - Si el lente está sucio, tiene una pestaña, o algún cuerpo extraño sobre él, o el problema desaparece y el lente no parece haberse afectado, límpielo completamente, enjuáguelo y desinfecte el lente antes de reinsertarlo.
 - Si los síntomas arriba mencionados continúan después de la remoción o en el momento de la reinsertación del lente, remueva el lente inmediatamente, y contacte pronto a su profesional del cuidado de la visión.
- Puede haber ocurrido una condición seria tal como una infección, úlcera corneal (queratitis ulcerativa), o iritis. Estas condiciones pueden progresar rápidamente y ocasionar una pérdida de visión permanente. Reacciones menos graves como abrasiones, manchas epiteliales, y conjuntivitis bacteriana deben manejarse y ser tratadas temprano para evitar complicaciones más serias.
- La sequedad ocasional puede ser aliviada parpadeando en forma completa varias veces o por medio del uso de gotas lubricantes que estén aprobadas para su uso con lentes de contacto blandos. Si la sequedad persiste, consulte con su profesional del cuidado de la visión.
 - Si un lente se adhiere (deja de moverse), aplique varias gotas de solución lubricante para lentes de contacto y espere hasta que el lente empiece a moverse libremente en el ojo. Si este problema persiste, consulte con su profesional del cuidado de la visión.
 - Si un lente se desplaza del centro del ojo, puede acomodarlo de la siguiente manera:
 - Cerrando sus párpados y masajeadlo suavemente para que el lente se acomode en su sitio, o
 - Mirando en dirección del lente y parpadeando suavemente, o
 - Empujando suavemente el lente descentrado hacia la córnea con presión leve del dedo en el borde del párpado superior o inferior.
 - Si un lente se rompe en su ojo, remueva las piezas cuidadosamente pellizcándolo como lo haría durante la remoción normal de un lente. Si las piezas del lente no se pueden remover fácilmente, no pellizque el tejido del ojo. Enjuague con solución salina e intente remover las piezas de nuevo. Si esto no ayuda, contacte a su profesional del cuidado de la visión para que le asista.

Emergencias generales:

- Cuando productos químicos de cualquier tipo salpiquen dentro de los ojos (productos del hogar, soluciones para jardinería, productos químicos de laboratorio, etc.):
 - Enjuague inmediatamente los ojos con solución salina nueva o agua de la llave.
 - Remueva y desheche los lentes y contacte inmediatamente a su profesional del cuidado de la visión o acuda emergencias hospitalarias sin retrasos.

INSTRUCCIONES DE USO

USO RECOMENDADO Y PROGRAMA DE REEMPLAZO

El uso y programa de reemplazo deben ser determinados por un profesional del cuidado de la visión basándose en las necesidades individuales de cada paciente y en las condiciones fisiológicas. Los lentes están aprobados para uso diario solamente (menos de 24 horas mientras esté despierto) y deben ser removidos mientras se duerme. El tiempo de uso diario podría aumentarse gradualmente hasta alcanzar el máximo recomendado

Los lentes de contacto deben ser desechados y reemplazados con un nuevo par cada mes, o con mayor frecuencia si es recomendado por el profesional del cuidado de la visión.

INSTRUCCIONES DE MANEJO DE LENTES

- Siempre debe lavarse y enjuagarse totalmente las manos y secarlas completamente con una toalla limpia y libre de pelusas antes de manipular los lentes de contacto.
- Suavemente agite el empaque blíster (que contenga un lente nuevo fresco) antes de su apertura.
- Remueva el lente del empaque blíster (o del estuche de almacenamiento del lente en el caso de lentes previamente usados) vertiéndolo suavemente sobre la palma de la mano.
- Asegúrese que el lente se encuentre del lado correcto hacia afuera y que tenga el lente correcto para cada ojo.
- Inspeccione los lentes antes de su inserción.
- No insérte lentes dañados o sucios.

INSTRUCCIONES DE INSERCIÓN DE LOS LENTES

- Lávese y enjuáguese las manos totalmente y séquelas completamente con una toalla limpia y libre de pelusas, antes de manipular sus lentes de contacto.
- Coloque un lente sobre la punta de su limpio y seco dedo índice derecho o izquierdo. Coloque el dedo medio de la misma mano cerca de las pestañas inferiores y jale hacia abajo el párpado inferior.
- Utilice los dedos de la otra mano para levantar el párpado superior.
- Coloque los lentes directamente sobre el ojo (córnea) y suavemente ruede el dedo alejándolo del lente.

- Mire hacia abajo y lentamente suelte el párpado inferior.
- Mire hacia adelante en línea recta y lentamente suelte el párpado superior.
- Parpadee suavemente.

INSTRUCCIONES PARA REMOCIÓN DE LENTES

- Lávese y enjuáguese las manos totalmente, y séquelas completamente con una toalla limpia y libre de pelusas.
- Parpadee completamente varias veces.
- Mientras mira hacia arriba, use la punta de su dedo para deslizar el lente hacia abajo hacia la parte blanca del ojo.
- Remueva el lente pellizcando suavemente entre el dedo pulgar y el dedo índice. No pellizque el tejido del ojo.
- Si es difícil remover el lente, aplique una gota de una solución lubricante y rehumectante e intente nuevamente después de varios minutos.
- Nunca utilice pinzas, ventosas, objetos cortantes o las uñas de los dedos para remover los lentes del contenedor o de los ojos.

Si experimenta problemas con la remoción de los lentes (si los lentes se han desplazado del centro o se han dañado), lea arriba **QUÉ HACER SI OCURRE UN PROBLEMA**

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL CUIDADO DE LOS LENTES

- Cada vez que los lentes son removidos del ojo deben limpiarse adecuadamente, enjuagarse, y desinfectarse antes de ser usados de nuevo.
 - El profesional del cuidado de la visión debe recomendar y proveer instrucciones para un sistema apropiado de cuidado de lentes. No cambie el sistema de cuidado de lentes sin primero consultar a su profesional del cuidado de la visión.
 - Los productos para el cuidado de los lentes tienen usos e instrucciones diferentes. Para evitar problemas oculares o daño de sus lentes, lea siempre y siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante para el(los) producto(s) usado(s).
 - Algunos productos para el cuidado de lentes requieren de un paso de frotar y enjuagar. Si es así, siga las instrucciones del fabricante en cuanto a la cantidad de solución a usar y en relación con el tiempo requerido para frotar y enjuagar con el fin de reducir el riesgo de infecciones oculares serias.
- Remojo y Almacenamiento de los Lentes:
 - Use únicamente solución nueva para el cuidado de los lentes de contacto cada vez que remoje (almacene) sus lentes.
 - La cantidad de tiempo que puede almacenar los lentes antes de que sea necesario repetir los pasos de limpieza, enjuague y desinfección variará según el producto de cuidado de lentes utilizado. Siga las instrucciones del fabricante.
 - No reutilice ni "complete" soluciones antiguas que queden en su estuche para lentes ya que el reuso de soluciones reduce la desinfección efectiva del lente y podría ocasionar una infección severa, pérdida de visión o ceguera. "Completar" una solución significa agregar solución nueva a la solución que ya se encuentra en su estuche.
- Después de abierta la solución para el cuidado de lentes, deseche cualquier solución remanente que quede posterior al periodo recomendado por el fabricante.
- No use productos diseñados únicamente para lentes duros o rígidos permeables al gas.
- Nunca use calor con soluciones para el cuidado de lentes de contacto o para desinfectarlos
- Nunca use agua, solución salina, o gotas lubricantes para desinfectar sus lentes. Estas soluciones no desinfectarán sus lentes. El no usar la solución desinfectante recomendada puede llevar a una infección severa, pérdida de visión o ceguera.

SOLUCIONES DE CUIDADO DE LENTES

Siga las instrucciones del fabricante para los productos de cuidado de lentes recomendado por el profesional del cuidado de la visión. Alcon recomienda los siguientes productos, cuando estén disponibles:

- Solución Desinfectante y de Limpieza AOSEPT™ PLUS con HydraGlyde™
- Solución Desinfectante Multipropósito OPTI-FREE™ PureMoist™

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL ESTUCHE DEL LENTE

Las soluciones para el cuidado de lentes de contacto y los estuches para lentes de contacto varían y tienen diferentes propósitos e instrucciones de uso. Algunos estuches son exclusivos para guardar los lentes de contacto, mientras que otros están diseñados especialmente para contener un disco neutralizante para ser usado con sistemas de limpieza y desinfección con peróxido de hidrógeno. Si no han sido usados diariamente, los lentes que hayan sido limpiados y desinfectados pueden ser guardados en el estuche no abierto por un periodo de tiempo que varía dependiendo de la solución para lentes de contacto y del estuche para lentes usado. **Siga siempre las instrucciones provistas por el fabricante para los productos de cuidados de lentes usados.**

- El profesional del cuidado de la visión debe instruir al paciente acerca de cómo usar la(s) solución(es) para el cuidado de lentes recomendada(s) y el estuche del lente.
- Los estuches para lentes de contacto pueden ser una fuente de crecimiento bacteriano y requieren de una limpieza, secado y reemplazo adecuados para evitar la contaminación o daño de los lentes:
 - Limpie los estuches de los lentes de contacto con una solución para lentes de contacto apropiada y séquelos de acuerdo a las instrucciones para el estuche de los lentes. Las instrucciones de secado, tales como secado con aire o limpieza con una toalla libre de pelusas, pueden variar dependiendo del estuche para lentes usado.
 - Reemplace los estuches para lentes de contacto por lo menos una vez cada 3 meses, o según lo recomiende el fabricante de estuches para lentes.
 - Reemplace los estuches para lentes diseñados especialmente que contengan un disco neutralizante de acuerdo con las instrucciones del fabricante, o hágalo más pronto si los lentes que han sido limpiados y desinfectados ocasionan ardor y picazón.
 - No guarde sus lentes ni enjuague su estuche para lentes con agua ni con ninguna solución no-estéril. Utilice únicamente solución nueva para el cuidado de lentes con el fin de evitar la contaminación de sus lentes o del estuche de los lentes. El uso de una solución no-estéril puede ocasionar una infección severa, pérdida de visión o ceguera.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Deseche los lentes de contacto y la tapa del blíster en el contenedor de basura, no en el lavabo o en el inodoro. El empaque de cartón y la cubierta plástica de polipropileno (PP) del empaque del blíster deben ser desechados en el contenedor de basura o reciclado de acuerdo a la guía de manejo de residuos locales.














CONTENIDO DEL ENVASE (Cómo es Suministrado)

Cada lente es empaquetado en un empaque blíster plástico de lámina sellada que contiene solución salina amortiguada con fosfato la cual contiene 1% Copolímero 845 (Copolímero de 0.2% de Vinilpirrolidona / Dimetilaminoetilmetacrilato), y es esterilizada con vapor.

El empaque blíster está marcado con los parámetros del lente incluyendo la curva de base, diámetro, poder dióptrico y patrón/color de impresión de los lentes, así como el número de lote de manufactura, fecha de manufactura y fecha de expiración.

Los lentes se suministran en cajas que contienen hasta 6 lentes de contacto individualmente sellados.

SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS QUE PODRIAN SER USADOS EN EL ETIQUETADO

ABREVIACIÓN / SIMBOLO	DEFINICIÓN
BC	Curva Base
DIA	Diámetro
PWR	Poder
D	Dioptría (poder del lente)
L	Izquierdo
R	Derecho
VP/DMAEMA	Vinilpirrolidona /Dimetilaminoetilmetacrilato
	Signo de licencia de residuos de empaque
	Código de lote
	Utilizar hasta la fecha
EXP	Fecha de vencimiento
	Sistema de barrera estéril simple
	Esterilizado por vapor
	Dos letras para código de lenguaje (Ejemplo mostrado: Inglés)
	Precaución
	Consulte instrucciones de uso
	No utilice si el empaque blíster está dañado
	Fabricante
	Fecha de manufactura
	Dispositivo Médico
	ADVERTENCIA: La Ley Federal (Estados Unidos) tiene una restricción para dispositivo que solo puede ser vendido por o bajo la orden de un profesional del cuidado de la visión licenciado.



Fabricante
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

Fecha de emisión: 04/2021

91024733-0421

Alcon

© 2021 Alcon Inc.

Importado y Distribuido en Argentina por:

Alcon Laboratorios Argentina S.A.
Av. Panamericana 28047, Don Torcuato, Bs. As. Argentina
Servicio de Atención al Cliente: 0800-555-4585
Directora Técnica: Farm. Verónica B. Cini, Matrícula N°: 13.171
USO BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Importado y Distribuido en Chile por:

Alcon Laboratorios Chile Ltda.
Rosario Norte 615, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile

Importado y Distribuido en Ecuador por:

Alconlab Ecuador S.A.
Quito-Ecuador
Los lentes deben almacenarse a una temperatura no mayor a 30°C.

Importado y Distribuido en México por:

Alcon Laboratorios, S.A. de C.V.
Rancho San Javier S/N, int. Lote fusión 2 y 3 interior 3B, Colonia Exhacienda San Miguel, C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México.

Importado y distribuido en Uruguay por:

Alcon Laboratorios Uruguay S.A.
Pasaje Paseo de las Carreteras 2580 / 1205-Tel: 29150915
D.T.: Q.F. Mariano Ayende

REFERENCIAS

¹ Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

² Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.



91024733-0421